



## CryoPro®. Cryochirurgie apparatuur.

Heeft u vloeibare stikstof nodig voor cryochirurgie behandelingen?

Linde kan u hiervoor vloeibare stikstof leveren als koude-medium. CryoPro levert uitstekende prestaties in termen van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak!

De CryoPro wordt standaard voorzien van zes verschillende spraytips. De vorm en grootte van de spraytip bepaalt de overdracht van koude op de te behandelen plaats. Deze spraytips zijn bedoeld voor de meest gebruikelijke behandelingen, zoals wratten, kleine tumoren en overige huidaandoeningen. De aansluiting op de koudekop is overigens uitwisselbaar met de meest voorkomende systemen, zodat het veelal ook mogelijk is spraytips van ander fabricaat te gebruiken. Uit het aanbod van tips kunt u kiezen uit verschillende types.

### Methode

Door zijn eenvoud, hoge nauwkeurigheid en lage kosten, is cryotherapie een volledig erkende en vaak toegepaste methode voor de behandeling van een variëteit aan huidletsels. De behandeling staat bekend als minder pijnlijk en vergt normaal gesproken geen anesthesie.

De CryoPro is te verkiezen boven andere systemen zoals het gebruik van lachgas, dat bevriest bij  $-85^{\circ}\text{C}$ . Vloeibare stikstof is  $-196^{\circ}\text{C}$  en kan met de bijgeleverde spraytips of de optionele contacttips beter gedoseerd worden, waardoor de behandeling effectiever is. De CryoPro biedt een gewilde combinatie van lage temperatuur, een uitgebreid arsenaal toebehoren voor spuit- of contactbevriezing en een hoge mate van probleemoplossend vermogen. De cosmetische resultaten zijn uitstekend en maken de CryoPro tot een van de meest universele cryochirurgische instrumenten.



### Technische specificaties

Model	CryoPro Mini	CryoPro Maxi
Artikelcode	7305818	7305817
Inhoud	350 ml	500 ml
Statische houdbaarheid	12 uur	24 uur


### Universele afnamehevel

Voor het vullen van de CryoPro maakt men gebruik van verschillende soorten stikstofvaten. Om de vloeibare stikstof veilig over te hevelen naar een CryoPro, kunt u gebruik maken van de universele afnamehevel. Deze past op bijna ieder gewenst stikstofvat met een nekdiаметer van 50 mm. Het werkt gebruiksvriendelijk en het voordeel hiervan is, is dat het op de meeste vaten past en u het weer kunt opbergen, zodra het spuitbusje weer gevuld is.


### CryoCare

Naast het leveren van de CryoPro voorziet Linde dermatologen en huisartsen in Nederland en België van vloeibare stikstof voor de behandeling van wratten of het uitvoeren van kleine cryochirurgische ingrepen. Linde bezorgt de vloeibare stikstof op het afgesproken adres in veilige, vacuümgeïsoleerde vaatjes, volgens een overeengekomen leveringschema. Om besmetting uit te sluiten, worden de CryoCare-vaatjes apart gevuld en vervoerd en niet gecombineerd met materiaal of leveringen aan de veterinaire sector. Afhankelijk van uw behoefte, kunt u kiezen uit vaatjes van 1,5 liter, 6 liter of 8 liter vloeibare stikstof. Aangezien de veiligheid van onze klant centraal staat, wordt er bij deze service ook een draagbare zuurstofdetectie geleverd.


## Accessoires\*

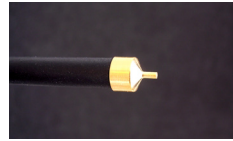


Contacttip 1 mm  
Artikelcode 7308361

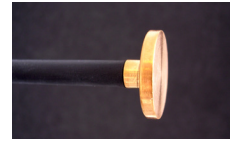


Contacttip 20 mm  
Artikelcode op aanvraag

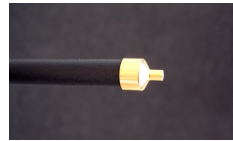

Contacttip 2 mm  
Artikelcode 7305819

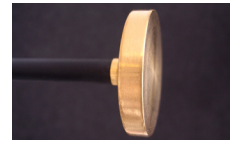


Contacttip 30 mm  
Artikelcode op aanvraag

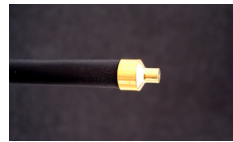

Contacttip 3 mm  
Artikelcode 7307712



Acne spraytip  
Artikelcode 7308082

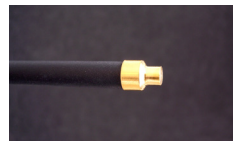

Contacttip 4 mm  
Artikelcode 7307713




Gebogen hulpstukje  
Artikelcode 7309977



Contacttip 5 mm  
Artikelcode 7305820



Recht hulpstukje  
Artikelcode 7309199

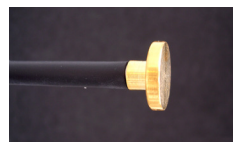

Contacttip 15 mm  
Artikelcode op aanvraag



Scherpe contacttip  
Artikelcode op aanvraag

\*Niet alle accessoires zijn hier vermeld. Voor overige accessoires kunt u contact opnemen met het Customer Service Center.

Wilt u meer weten over de CryoPro of heeft u vragen over de CryoCare service die Linde biedt? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van het Customer Service Center op telefoonnummer 040-2825858. Zij nemen uw vragen in behandeling en helpen u graag.

#### Linde Healthcare Benelux

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875, [info.healthcare.nl@linde.com](mailto:info.healthcare.nl@linde.com), [www.linde-healthcare.nl](http://www.linde-healthcare.nl)

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, [info.healthcare.be@linde.com](mailto:info.healthcare.be@linde.com), [www.linde-healthcare.be](http://www.linde-healthcare.be)